



抗体稀释液说明书

商品名称：抗体稀释液

【包装规格】

100ml/瓶 200ml /瓶

【预期用途】 用于对检测用抗体进行稀释并保证稀释后抗体在 2-8℃ 保存的稳定性。

【检验原理】 稀释液中所含的蛋白保护成分可保证抗体的稳定性和降低非特异反应，缓冲系统可为抗体的保存和检测反应提供适合的环境。

【主要组成成分】

NaCl、NaH₂PO₄、Na₂HPO₄、Tween-20、Proclin300、保护性蛋白、蛋白稳定剂及工艺用水

【储存条件及有效期】

2-8℃ 避光保存，避免冷冻，有效期 12 个月。

运输条件：泡沫箱加冰袋密封，常温运输，路途时间不超过 7 天。生产日期及有效期见标签。

【检验方法】

1. 按照抗体说明书推荐的稀释比例或检测所需稀释比例对抗体进行稀释。

【产品性能指标】

1. 外观

澄清透明微黄色的液体。

2. 保护性

用本品稀释抗体至工作浓度，2-8℃ 保存时间不低于 6 个月。

3. 符合性

用本试剂稀释抗体进行免疫组织化学（IHC）检测，染色结果阳性着色定位准确，且无背景染色；同时，空白对照和阴性对照染色结果为阴性

【注意事项】

1. 实验人员必须经专业培训，使用前应仔细阅读本说明书。
2. 应将组织切片样本视为潜在的传染源，本品与样本接触后产生的废液其处理均需符合《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》和《医疗废物管理条例》等相关法规要求。
3. 本产品含蛋白成分，室温放置过久易导致蛋白的降解和活性丧失。



武汉原谷生物科技有限责任公司

Wuhan Yuangu Biotechnology Co.,Ltd

-
4. 用本品稀释抗体制备的工作液，2~8℃可保存 6 个月，但需注意避免在普通环境下多次取用，建议根据使用量和使用频率分装保存。
 5. 必须严格按抗体说明书或预实验结果要求的稀释比进行抗体稀释，否则将导致不可靠的实验结果。

【说明书核准日期及修改日期】 核准日期：

2020 年 05 月 15 日

修改日期：2021 年 01 月 20 日